

# 产品目录



**91-110-000**  
Ustomed  
工具钳 4 把



**2937.B0.54**  
Dentag  
焊接帽就位工具 - 直



**2937.B0.64**  
Dentag  
焊接帽就位工具 - 弯



**2995.Y0.01**  
Dentag  
种植锤



**4450.Y0.01**  
Dentag  
拔冠钳



**4204.B0.01**  
Dentag  
手用转换手柄 - 直



**4204.B0.02**  
Dentag  
手用转换手柄 - 弯



**31072906**  
Ankylos  
冠就位工具头 凸  
(5PCS)



**31072907**  
Ankylos  
冠就位工具头 U  
(5PCS)



**31072908**  
Ankylos  
冠就位工具头 凹  
(5PCS)



**31072911**  
Ankylos  
冠就位工具



**31036120**  
Ankylos  
修复盒



**31033628**  
Ankylos  
修复棘轮  
六角 - 长



**31033633**  
Ankylos  
修复棘轮  
用于 A 基台 - 长



**31033634**  
Ankylos  
修复棘轮  
用于 B 基台 - 长



**Implanteeth**  
茵伯特 (上海) 医疗技术有限公司

地址 : 上海市松江人民路201号6号楼403室  
Room 403, Building 6, NO.201, Minyi Road,  
Songjiang District, Shanghai, 201612, PRC  
Tel : 86-21-37011189  
86-21-37011181 (订货咨询/Order Consultation)  
Fax : 86-21-37011182 37011183

省级经销商联系方式粘贴处



# MediWeld 冷焊机



茵伯特（上海）医疗技术有限公司  
SHANGHAI IMPLANTEETH MEDICAL TECHNOLOGY CO.,LTD.





## Medi Weld

——基于冷焊接概念的种植设备  
创新性“不粘接不螺丝”式修复



通过冷焊机将特殊的焊接元件和钛丝焊接起来，精准地就位在基台上，得到一个稳定的框架，为临时或永久修复提供最佳的支持。

- 满足病人对即刻修复的需求
- 手术过程和修复在同一天完成
- 节约时间和成本
- 通过特殊的标准化方案，减少预约次数，降低总治疗时间和费用
- 提高即刻负重治疗的安全性和可预见性




### Dr. Marco Degidi, Bologna, Italy

骨结合学院活跃成员，国际口腔种植学院文凭，专注于种植和修复的 Bologna 私人诊所创始人，Chieti 大学临床种植学和生物材料学教授，研究生项目导师，Bologna 大学临床种植学教授，研究生项目导师，知名国际讲师，在国内外期刊发表众多学术文章。




### Gianluca Sighinolfi, Bologna, Italy

1989年毕业于意大利 Villaggio del Fanciullo，随后在 Bologna 一家著名的牙科实验室工作，成为合伙人。1966年以来 Gianluca 专注于与 Dr. Marco Degidi 和 Prof Piattelli 合作进行的即刻负重研究。为制定新的手术方案和发表在主流国际评论和期刊上的许多相关主题的文章作出了重大贡献。

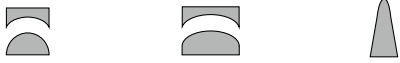

• USTOMED 工具钳：  
用以弯制和剪断钛丝

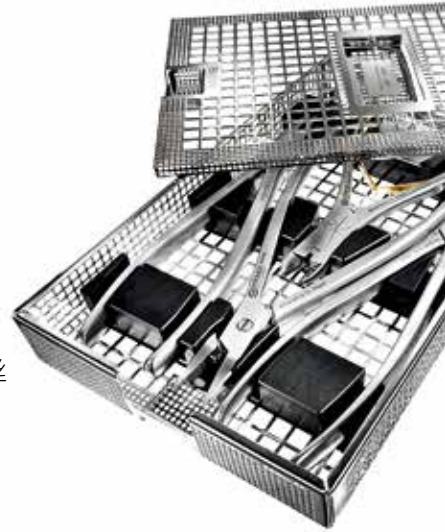


• 种植锤



• 拔冠钳



• 焊接帽就位杆

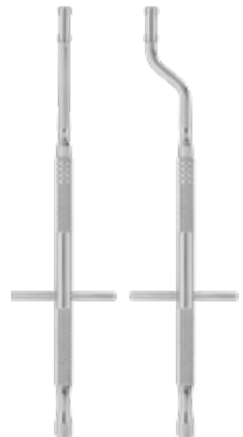


• 十字手柄


## 操作流程




Ankylos 种植体

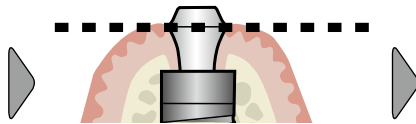

基台水平修复

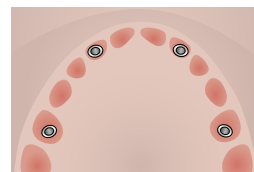

种植体及基台就位

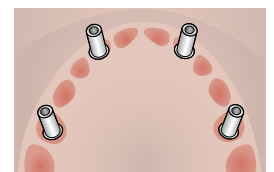

专用焊接帽就位

# Ankylos®



- 冠就位工具



- 冠就位工具头：  
凸型，U型，凹型  
Peek 材质，未经灭菌，一次性使用



- 根据冠的形状选择合适的工具头。  
将工具沿着冠的方向按压，直到就位。



- 冠就位工具必须拆开清洗完全干燥后才能组装消毒




- 修复盒工具：

螺丝刀手柄，标准 Ø7mm  
 微创螺丝刀，短（旋出覆盖螺丝）  
 微创螺丝刀，长（旋出覆盖螺丝）  
 1.0 mm 六角螺丝刀，短  
 1.0 mm 六角螺丝刀，长  
 1.0 mm 一字螺丝刀  
 1.6 mm 一字螺丝刀  
 标准角度基台定位器  
 修复棘轮，1.0 mm 六角，15 Ncm  
 修复棘轮，1.8 mm 六角，25 Ncm  
 修复棘轮，1.0 mm 六角，短，10 Ncm  
 标准 a 基台（直）修复棘轮，25 Ncm  
 标准 b 基台（直）修复棘轮，25 Ncm  
 修复棘轮扳手  
 修复棘轮复位器



- 修复工具（选配）：


修复棘轮，1.0 mm 六角，长，15 Ncm  
 标准 a 基台（直）修复棘轮，长，25 Ncm  
 标准 b 基台（直）修复棘轮，长，25 Ncm

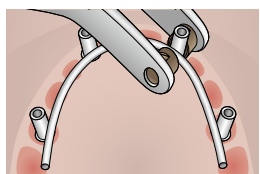


弯制、就位、  
焊接钛丝



焊接固位钛丝

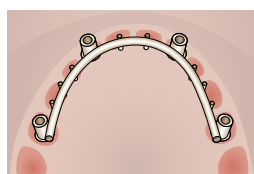

将涂层钛框架就位

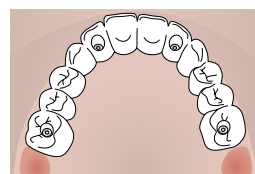

完成修复

# 产品目录

## Medi Weld 冷焊机



1001000000

## 钛丝



YBT-LJ-13

**52-TX-D10**  
D1.0 / L150  
(5pcs)



YBT-LJ-14

**52-TX-D12**  
D1.2 / L150  
(5pcs)



YBT-LJ-15

**52-TX-D15**  
D1.5 / L150  
(5pcs)



YBT-LJ-16

**52-TX-D20**  
D2.0 / L150  
(5pcs)

## Ankylos® 标准基台焊接帽



YBT-LJ-11

**52-HJM-A40**  
a / 4.0



YBT-LJ-12

**52-HJM-A60**  
a / 6.0



YBT-LJ-08

**52-HJM-B40**  
b / 4.0



YBT-LJ-10

**52-HJM-B60**  
b / 6.0

## Ankylos® 标准基台平行杆



YBT-LJ-01

**53-PXG-A40**  
a / 4.0



YBT-LJ-02

**53-PXG-A60**  
a / 6.0



YBT-LJ-03

**53-PXG-B40**  
b / 4.0



YBT-LJ-04

**53-PXG-B60**  
b / 6.0

## Ankylos® 平衡基牙基台 (窄) 焊接帽



YBT-LJ-09

**52-HJM-BBA**

## Ankylos® 内连接套筒



YBT-LJ-05

**52-TT-G15**  
GH 1.5



YBT-LJ-06

**52-TT-G30**  
GH 3.0



YBT-LJ-07

**52-TT-G45**  
GH 4.5

## SynCone® 5° 焊接帽



YBT-LJ-17

**52-HJM-SC5**